



ASSUT EUROPE


SUTURE CHIRURGICHE




®

More than surgery

Test Rápido
COVID-19/Influenza A+B
Antígeno Combo

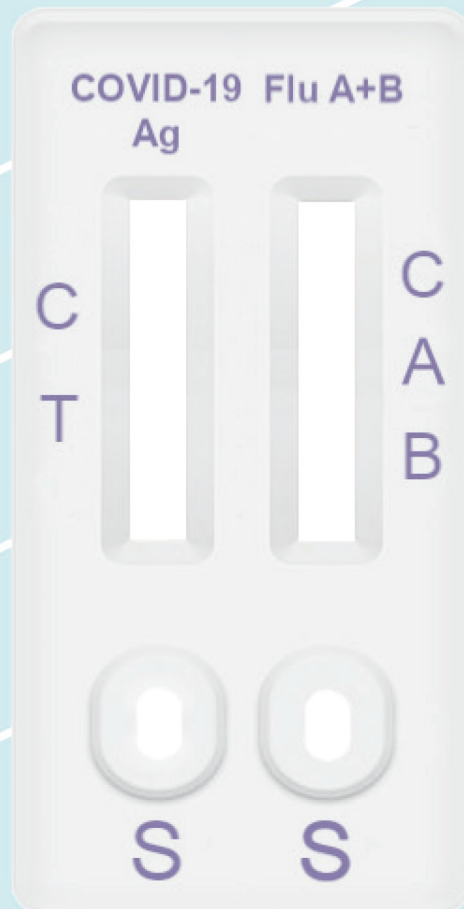


El Test rápido Combo de antígeno COVID-19/Influenza A + B es un inmunoensayo de flujo lateral destinado a la detección cualitativa de antígenos nucleoproteínicos virales del SARS-CoV-2, influenza A y B en frotis nasofaríngeos en sujetos con sospecha de infección viral respiratoria coherente con COVID-19 por el trabajador de salud. Los síntomas de la infección viral respiratoria debida al SARS-CoV-2 y los de la gripe pueden ser muy similares.

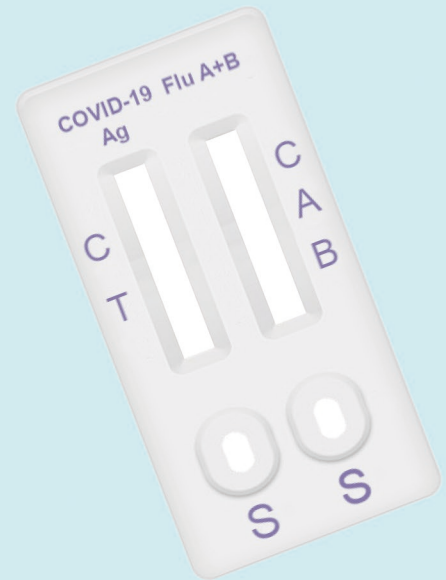

Contenido del kit



Preparación de la muestra y procedimiento de test

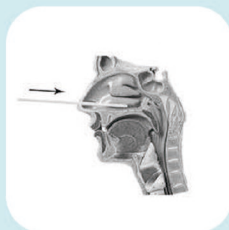

1. Inserte el hisopo estéril a través de la fosa nasal paralela al paladar



2. Frote y gire el hisopo y déjelo en su lugar durante unos segundos para que absorba las secreciones.




3. Retire lentamente el hisopo girándolo.




4. Agregue todo el reactivo de extracción de muestras a un tubo de extracción y colóquelo en la base de trabajo.



5. Inserte el hisopo en el tubo. Gírelo al menos 5 veces mientras presiona la cabeza contra la base y la pared lateral del tubo, y déjelo allí durante 1 minuto.

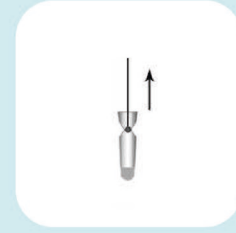


6. Apriete el tubo de extracción y retire el hisopo.

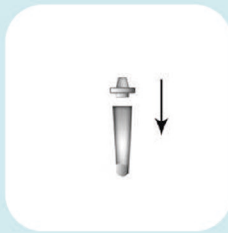

7. Inserte la punta del gotero en el tubo.




8. Transfiera 3 gotas al pozo del casete de test.

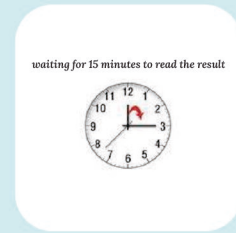


9. Interprete los resultados en 15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos

Interpretación de resultados

COVID-19 Ag

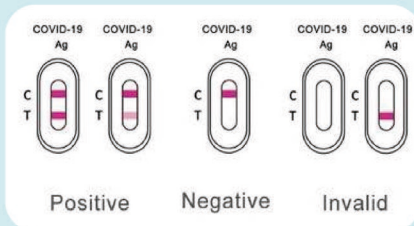

Flu A+B

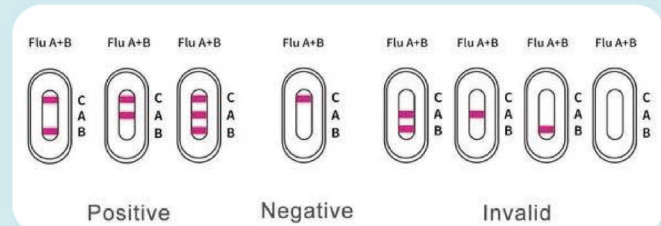

Código de producto

Descripción

Embalaje

???

Covid-19/Influenza A+B
Antigen Combo Rapid Test

???

