




*More than surgery*



ATAL INNOVATIONS, S.L

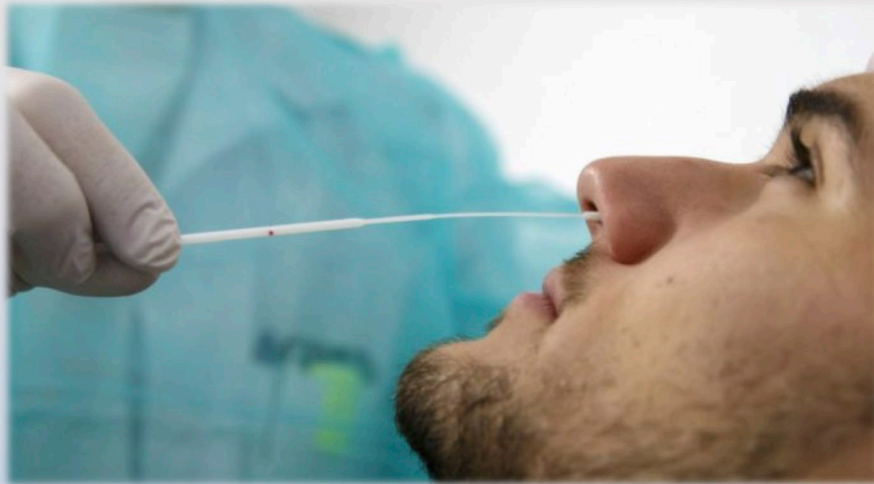

# COVID-19

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENO  
HISOPO NASOFARÍNGEO

**SIMPLE**

**RÁPIDO**

**PRECISO**



“SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit” es un kit de test inmunocromatográfico para la detección cualitativa del antígeno de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en muestras de hisopos nasofaríngeos (NP).

Proporciona ayuda en el diagnóstico de la infección por SARS-COV-2 El nuevo kit no diferencia entre el SARSCoV y el SARS-CoV-2.


## RECOGIDA DE LA MUESTRA



Utilice el bastoncillo de algodón incluido en el kit.

1. Inserte con cuidado el hisopo en la fosa nasal del paciente, hasta llegar a la superficie nasofaríngea posterior.
2. Frote la superficie nasofaríngea posterior. Gire el hisopo varias veces.

## PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

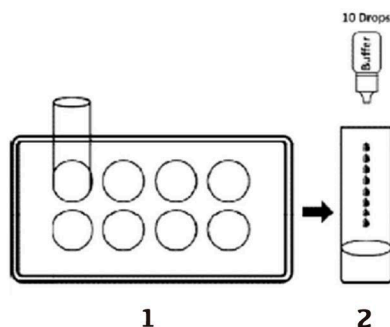

1. Inserte el tubo desechable en la estación de trabajo. Asegúrese de que el tubo esté estacionario y llegue al fondo de la estación de trabajo.


2. Agregue 0.3 ml (aproximadamente 10 gotas) del buffer al tubo.

3. Inserte el hisopo en el tubo (que contiene 0,3 ml de buffer)


4. Gire el hisopo al menos 6 veces mientras presiona la cabeza del hisopo contra la parte inferior y lateral del tubo.

5. Deje el hisopo en el tubo durante 1 minuto.

6. Apriete el tubo varias veces con los dedos desde el exterior para sumergir el hisopo. Retire el hisopo. La solución extraída se utilizará como muestra para el test.

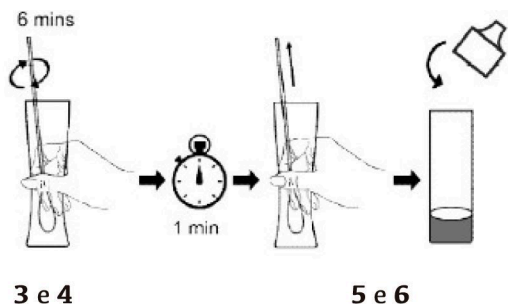

## INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

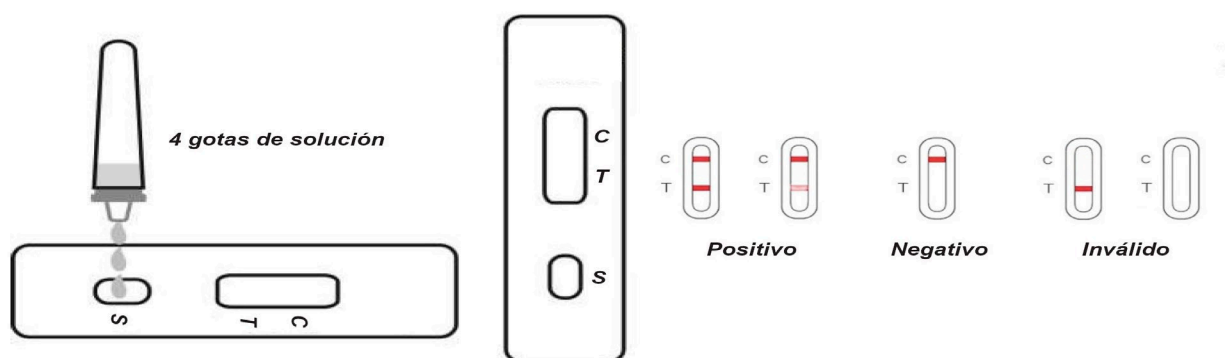

**Positivo (+):** Ambas líneas T y C se muestran dentro de los 15 minutos posteriores a la adición de la muestra.

**Negativo (-):** Aparece una línea C mientras que no aparece ninguna línea T dentro de los 15 minutos posteriores a la adición de la muestra.

**Inválido:** Si no se muestra la línea C, el resultado del test no es válido y debe repetir el test con otro casete de test.

Espera a que aparezcan las tiras de colores.

Lea el resultado en 15 minutos. No lea el resultado después de 20 minutos.

## COMPONENTES DEL KIT

- 1 Casete de test desechable
- 1 Tubo desechable para extracción de muestras y una tapa con gotero
- 1 Bastoncillo de algodón desechable
- 1 Buffer desechable

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
COVID-19-AGA	Kit de detección de antígeno del SARS-COV-2	CAJA DE 20/25

