

Instrucciones de uso mascarillas FFP2 NR

Atal Innovations S.L. especifica las instrucciones de uso de la mascarilla en cuestión tanto en el envasado interno como en el envasado externo (caja exterior) tal como se especifica en los ejemplos adjuntos en este documento.

El texto que se incluye en ambos envases es el siguiente:

Instrucciones de uso:

1. Abra la mascarilla tirando de las comas con ambas manos y colocando el clip nasal en la parte superior.
2. Colóquese la mascarilla contra la barbilla cubriendo la nariz y boca
3. Tire de las gomas hasta colocarlas detrás de las orejas y acomódelas a su gusto.
4. Ajuste el clip nasal utilizando ambas manos. Coloque los dedos en el centro del clip y presione a ambos lados ajustando el clip a la nariz hasta que quede completamente sellado (usar una sola mano puede comprometer el ajuste de la mascarilla).
5. Cubra la mascarilla con ambas manos sin tocarla y exhale vigorosamente. En caso de sentir que el aire se escapa vuelva a justarse el clip nasal y/o las gomas de las orejas.



Envasado externo





ATAL INNOVATIONS, S.L

CONCURSO SUMINISTRO
MASCARILLAS OSAKIDETZA
EXPEDIENTE: 2020/01681

Número de Lote: 3
Documentación: Instrucciones de uso
Página: 3 de 5



20 PCS MASK
non-medical use



Instrucciones de Uso

- 1: Abra la mascarilla tirando de las gomas con ambas manos y colocando el clip nasal en la parte superior.
- 2: Colóquese la mascarilla contra la barbilla cubriendo la nariz y la boca.
- 3: Tire de las gomas hasta colocarlas detrás de las orejas y acomódelas a su gusto.
- 4: Ajuste el clip nasal utilizando ambas manos. Coloque los dedos en el centro del clip y presione a ambos lados ajustando el clip a la nariz hasta que quede completamente sellado (usar una sola mano puede comprometer el ajuste de la máscara).
- 5: Cubra la mascarilla con ambas manos sin tocarla y exhale vigorosamente. En caso de sentir que el aire se escapa, vuelva a ajustarse el clip nasal y/o las gomas de las orejas.

Recomendaciones Previas

Previo al uso, asegúrese de que el embalaje de la mascarilla no se encuentra dañado y de que los componentes están en perfecto estado. En caso de no ser así, no utilice la mascarilla.

Previo a acceder al área de trabajo, se requiere comprobar el correcto ajuste de la mascarilla tal y como se indica en la sección anterior. En caso de sentir un ajuste incorrecto, vuelva a colocarse la mascarilla siguiendo las instrucciones. Acceda al área de trabajo solo cuando sienta un ajuste completo.

En caso de notar que la resistencia respiratoria aumenta mientras utiliza la mascarilla o que la mascarilla no cumpla con los requisitos, se recomienda el inmediato reemplazo de la mascarilla.

La declaración de conformidad se encuentra en el interior de la caja.

Mascarilla diseñada para proteger de partículas no grasas. Filtración Bacteriana de hasta el 95%.

No utilizar en caso de encontrar daños en el embalaje. No reutilizar ni utilizar en más de un turno de trabajo.



ATAL INNOVATIONS, S.L

CONCURSO SUMINISTRO
MASCARILLAS OSAKIDETZA
EXPEDIENTE: 2020/01681

Número de Lote: 3
Documentación: Instrucciones de uso
Página: 4 de 5



20 PCS MASK
non-medical use

Información del producto

Ref. Filtering half mask

Modelo: LG-DFM-01

Composición: Non-woven fabric 35.7%、Meltblown fabric 22.8%、ES hot air cotton 12%、Ear loops 21.5%、Nose strip 8%.

Nivel de Protección: FFP2 NR

Fecha de Expiración: 3 años desde fabricación

Fecha de fabricación: 2020-09-25

Nº lote: 20200925

Normativa aplicable: UNE-EN 149:2001+A1:2009

Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los Equipos de Protección Individual.

Fabricante:

Quanzhou Ligao Protective Product
Manufacturer Co. Ltd.
4/F, No221 Jitai Road,
Quanzhou Economic and
Technological Development Zone,
Fujian Province, P.R. China

Importador en Europa:

Atal Innovations S.L.
C/ Iturriondo Nº18 Nave 11c, P.A.E Ibarbarri
48940 - Leioa Bizkaia
Telf. 94 685 56 00
info@atalinnovations.com
Cif: B95941936

Precauciones

- 1: Si el embalaje está dañado, no utilice la mascarilla. La protección respiratoria se limita a partículas no grasas o aceitosas.
- 2: Se recomienda su almacenamiento en lugares secos y ventilados, sin acumulación de gases corrosivos y con humedades inferiores al 80%. Mantenga el producto alejado de Fuentes de ignición y materiales inflamables.
- 3: Este producto no está diseñado para su uso en industrias con ambientes anóxicos, acuáticos, control de incendios, con polvo industrial ni para su uso en niños.
- 4: No usar la mascarilla si no existe ventilación, sufre dificultades para respirar o durante el sueño.
- 5: Las personas con problemas cardiacos o pulmonares no deben utilizar la mascarilla.
- 6: Si la mascarilla está dañada o siente dificultad para respirar, cámbiese la mascarilla.
- 7: En caso de cualquier reacción adversa durante su uso, retirese la mascarilla inmediatamente.
- 8: No reutilizar la mascarilla.
- 9: La media máscara filtrante contra partículas no debe utilizarse durante más de un turno de trabajo.

No usar en caso de

- Temperatura ambiente superior a 50°C.
- Nivel de oxígeno inferior al 20%.
- Ambientes con gases tóxicos o nocivos.
- No se recomienda su uso en niños, mujeres embarazadas y ancianos.





ATAL INNOVATIONS,S.L

CONCURSO SUMINISTRO
MASCARILLAS OSAKIDETZA
EXPEDIENTE: 2020/01681

Número de Lote: 3
Documentación: Instrucciones de uso
Página: 5 de 5

Envasado interno

