

Instrucciones de Uso Mascarillas Quirúrgicas Tipo IIR

Nombre del Producto: Mascarilla Quirúrgica IIR.

Referencia del producto: KYD06

Medidas: 17,5cm x 9,5cm.

Composición:

<i>pieza</i>	<i>material</i>
Capa Interna	Tela no tejida blanca (partículas plásticas de PP)
Capa Media	Polipropileno (PP)
Capa Externa	Tela no tejida azul (partículas plásticas de PP)
Gomas	2x140d nylon + 210D spandex
Clip Nasal	Poliiolefina + varilla de hierro fina

Indicaciones de uso:

- 1- Lávese las manos con agua y jabón o una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
- 2- Ajuste la mascarilla cubriendo la nariz y la boca y ajuste la pinza nasal.
- 3- Coloque las comas detrás de las orejas, sin cruzarlas, y baje la parte inferior hasta la barbilla.
- 4- Ajuste la pinza nasal pellizcando con ambas manos y verifique el sellado y ausencia de molestias.
- 5- Se recomienda no tocar la mascarilla durante su uso. Si fuese imprescindible, lávese las manos con jabón y agua o soluciones hidroalcohólicas antes y después de su manipulación.
- 6- Retírese la mascarilla sin manipular la parte frontal y deséchala tal y como se indica posteriormente.

Desechar la mascarilla (SND/271/2020)

¿Padece síntomas o eres positivo por COVID?

Introducir la mascarilla en una bolsa y cerrar la misma. Introducir esta bolsa junto a los guantes y mascarilla del cuidador/a en una segunda bolsa y cerrar la misma. Depositar esta segunda bolsa junto al resto de desechos en el contenedor gris perteneciente a los "Restos".

¿No padece síntomas?

Las mascarillas se desecharan de forma habitual depositando las mascarillas en el contenedor gris perteneciente a los "Restos".

Advertencias y Precauciones

- No utilizar si el embalaje y/o el producto se encuentran deteriorados.
- Por cuestiones de comodidad e higiene, no se recomienda su uso por un tiempo superior a 4 horas.
- En caso de humedad o deterioro en la mascarilla, se recomienda su sustitución.



**INSTRUCCIONES DE USO
MASCARILALS QUIRÚRGICAS
TIPO IIR KYD06**

- No reutilizar el producto.
- El producto se debe almacenar en un lugar seco.



Guandong Yade Industry Co., Ltd.

Zhulin Village, Ziyungaoxin District, Meiyun Office, Rongcheng,
Jieyang City, Guandong, Popular Republic of China



SUNGO Europe B.V

Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam, Netherlands



ATAL INNOVATION S.L. (Importador)

C/ Iturriondo Nº18 Nave 11C, 48940 Leioa, Bizkaia

Versión del 30/10/2020



50 uds (5 packs x 10 uds)